

## OSTRZEŻENIA

### Przed wykonaniem testu należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w załączonej ulotce.

- Nie należy używać testu, jeśli foliowe opakowanie wewnętrzne jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie należy stosować testu po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 2-30 ° C, nie zamrażać.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Tylko do jednorazowego użycia.

# AMIL COMFORT

## test ciążowy strumieniowy

- do samodzielnego wykonania -

### INFORMACJE OGÓLNE

Test ciążowy AMIL comfort przeznaczony jest do wczesnego zdiagnozowania ciąży, wykrywa ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG). Hormon ten pojawia się w moczu ciężarnej kobiety około tygodnia po zapłodnieniu i jest wykrywalny podczas całego przebiegu ciąży.


Test ciążowy AMIL comfort ma czułość 20 mIU/ml i może być wykonany tak wcześnie jak to tylko możliwe, a więc od 6 dnia po spodziewanym zapłodnieniu, jednak dla uzyskania 99 % wiarygodności zaleca się wykonanie testu w dniu spodziewanej miesiączki.

### WYKONANIE TESTU

1. Bezpośrednio przed wykonaniem otwórz foliowe opakowanie i wyjmij test.
2. Zdejmij nasadkę testu.
3. Trzymając test za uchwyt skieruj końcówkę absorbującą w dół i umieść ją bezpośrednio w strumieniu moczu na co najmniej 10 sekund, aż do całkowitego zamoczenia. Usuń końcówkę absorbującą ze strumienia moczu.
4. Nałóż nasadkę na test, następnie połóż test na płaskiej powierzchni (okienko wyniku powinno być skierowane do góry) i zacznij odmierzać czas.
5. W zależności od stężenia hCG pozytywny wynik może pojawić się już po upływie 40 sekund, jednak dla potwierdzenia negatywnego wyniku należy odczekać 5 minut (całkowity czas reakcji).
6. Po odczytaniu wyniku wyrzuć test. Nie należy odczytywać wyniku po czasie dłuższym niż 30 minut.

UWAGA: Jeżeli wolisz, możesz zebrać mocz do suchego, czystego pojemnika, a następnie zanurzyć końcówkę absorbującą testu w próbce moczu na co najmniej 10 sekund i dalej postępować jak opisano w punktach 4,5,6.

Rysunek 1.

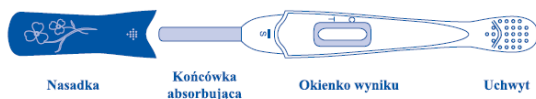

### INTERPRETACJA WYNIKÓW (Patrz rys. 1)

- *Wynik pozytywny:* Pojawienie się dwóch czerwonych linii w okienku wyniku - jedna w obszarze kontrolnym (C), druga w obszarze testowym (T) - oznacza ciążę.

UWAGA: Nawet jeśli linia w obszarze testowym (T) jest jaśniejsza od linii w obszarze kontrolnym (C) wynik jest pozytywny.

- *Wynik negatywny:* Pojawienie się jednej czerwonej linii w obszarze kontrolnym (C), przy braku linii w obszarze testowym (T), oznacza brak ciąży.

- *Błędny wynik:* Jeżeli w okienku wyniku nie pojawi się żadna barwna linia lub pojawi się tylko jedna linia w obszarze testowym (T), przy braku linii w

obszarze kontrolnym (C) - wynik jest nieprawidłowy. Należy ponownie wykonać test wykorzystując nowe opakowanie.

UWAGA: Najczęstszą przyczyną otrzymania błędnego wyniku jest użycie nieodpowiedniej ilości moczu lub nieprawidłowe przeprowadzenie testu.

#### NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

##### 1. Jak działa test ciążowy AMIL comfort?

Test ciążowy AMIL comfort wykrywa ludzką gonadotropinę kosmówkową w moczu - hormon produkowany przez organizm kobiety w czasie ciąży.

##### 2. Kiedy najwcześniej mogę wykonać test ciążowy AMIL comfort?

Test ciążowy AMIL comfort możesz wykonać tak wcześnie jak to tylko możliwe, a więc od 6 dnia po spodziewanym zapłodnieniu, jednak dla uzyskania 99% wiarygodności zaleca się wykonanie testu w dniu spodziewanej miesiączki.

##### 3. Czy muszę przeprowadzić test ciążowy AMIL comfort wykorzystując pierwszy poranny moczu?

Test ciążowy AMIL comfort możesz wykonać o każdej porze dnia, jednak twój pierwszy poranny moczu jest najbardziej skoncentrowany i zawiera największą ilość hormonu hCG.

##### 4. Jak wiarygodny jest test ciążowy AMIL comfort?

Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych i laboratoryjnych stwierdzono, że wiarygodność testu ciążowego AMIL comfort wynosi 99%. Warunkiem uzyskania pewnego wyniku jest prawidłowe przeprowadzenie testu.

##### 5. Co może mieć wpływ na wynik testu?

Na wynik testu mogą mieć wpływ:

- specjalistyczne leki zawierające hCG (falszywie pozytywny wynik).

Na wynik testu nie wpływają:

- antybiotyki,
- alkohol,
- doustne środki antykoncepcyjne,
- środki przeciwbólowe,
- terapia hormonalna niezawierająca hCG.

##### 6. Co powinnam zrobić jeśli otrzymany wynik wskazuje, że jestem w ciąży?

Powinnaś niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu potwierdzenia, że jesteś w ciąży. Test ciążowy AMIL comfort wykrywa tylko obecność hCG w moczu, na podstawie testu nie można stwierdzić czy ciąża rozwija się prawidłowo.

##### 7. Czy pozytywny wynik może oznaczać coś innego niż normalną ciążę?

W pewnych stanach patologicznych poziom hCG w moczu może być podwyższony, np.: ciąża pozamaciczna, torbiele jajników, niektóre choroby nowotworowe.

##### 8. Jak mogę stwierdzić, że test ciążowy AMIL comfort został wykonany prawidłowo?

Jeśli w obszarze kontrolnym (C) pojawi się czerwona linia możesz być pewna, że test został przeprowadzony w prawidłowy sposób.

##### 9. Co powinnam zrobić jeśli wynik pokazuje, że nie jestem w ciąży?

Wynik oznacza, że nie wykryto hormonu hCG w Twoim moczu i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeśli miesiączka nie pojawiła się w ciągu 2-3 dni po spodziewanym terminie, powtórz test, wykorzystując nowe opakowanie. Jeżeli znów otrzymasz negatywny wynik powinnaś udać się do lekarza, aby ustalić przyczynę braku miesiączki.

#### UWAGI

• Test ciążowy AMIL comfort jest testem jakościowym, wykrywa tylko obecność hormonu, nie jest przeznaczony do ilościowego określenia stężenia hCG w moczu. Każdy zarówno pozytywny jak i negatywny wynik powinien być potwierdzony przez lekarza.

• W przypadku gdy, stężenie hCG w moczu jest niższe niż czułość testu można otrzymać fałszywie negatywny wynik. Jeżeli nadal przypuszczasz, że jesteś w ciąży, powtórz test po upływie 48 godzin, wykorzystując pierwszy poranny moczu.

#### Wytwórca:

AMIL Sp. z o.o.  
ul. M. Brzeskiej 9/4  
20-640 Lublin, Polska  
www.amil.com.pl

