

AMIL TEST CIĄŻOWY PŁYTKOWY

do samodzielnego wykonania

INFORMACJE OGÓLNE

Test ciążyw AMIL przeznaczony jest do wczesnego zdiagnozowania ciąży, wykrywa ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG). Hormon ten pojawia się w moczu ciężarnej kobiety około tygodnia po zapłodnieniu i jest wykrywalny podczas całego przebiegu ciąży.

Test ciążyw AMIL ma czułość 20 mIU/ml i może być wykonany tak wcześnie jak to tylko możliwe, a więc od 6 dnia po spodziewanym zapłodnieniu, jednak dla uzyskania 99% wiarygodności zaleca się przeprowadzenie testu w dniu spodziewanej miesiączki.

OSTRZEŻENIA

Przed wykonaniem testu należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w załączonej ulotce.


- Nie należy używać testu, jeśli foliowe opakowanie wewnętrzne jest otwarte lub uszkodzone.
- Nie należy stosować testu po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 2-30 °C, nie zamrażać.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Tylko do jednorazowego użycia.

POBRANIE PRÓBKII

Próbkę moczu należy zebrać do załączonego plastikowego pojemniczka. Próbka może być pobrana o każdej porze dnia, najlepiej jednak jeśli do przeprowadzenia testu zostanie użyty pierwszy poranny moc, ponieważ jest on najbardziej skoncentrowany i zawiera największą ilość hormonu hCG.

WYKONANIE TESTU

1. Bezpośrednio przed wykonaniem testu otwórz foliowe opakowanie i wyjmij płytkę testową.
2. Połóż płytkę testową na czystej, poziomej powierzchni. Przy pomocy załączonej pipety nanieś 4 krople moczu do okienka próbki na płytce i zacznij odmierzać czas.
3. Zaczekaj do momentu pojawienia się barwnych linii. W zależności od stężenia hCG w moczu pozytywny wynik może pojawić się już po upływie 40 sekund, jednak dla potwierdzenia negatywnego wyniku, należy odczekać 5 minut (całkowity czas reakcji). Nie należy odczytywać wyniku po czasie dłuższym niż 30 minut.

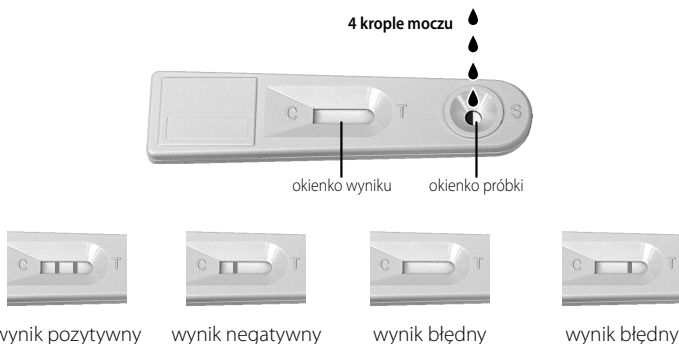

INTERPRETACJA WYNIKÓW

- **Wynik pozytywny:** Pojawienie się dwóch czerwonych linii w okienku wyniku - jedna w obszarze kontrolnym (C), druga w obszarze testowym (T) - oznacza ciążę.

UWAGA: Nawet jeśli linia w obszarze testowym (T) jest jaśniejsza od linii w obszarze kontrolnym (C) wynik jest pozytywny.

- **Wynik negatywny:** Pojawienie się jednej czerwonej linii w obszarze kontrolnym (C), przy braku linii w obszarze testowym (T), oznacza brak ciąży.

- **Błędny wynik:** Jeżeli w okienku wyniku nie pojawi się żadna barwna linia lub pojawi się tylko jedna linia w obszarze testowym (T), przy braku linii w obszarze kontrolnym (C) - wynik jest nieprawidłowy. Należy ponownie wykonać test wykorzystując nowe opakowanie.

UWAGA: Najczęstszą przyczyną otrzymania błędnego wyniku jest użycie nieodpowiedniej ilości moczu lub nieprawidłowe przeprowadzenie testu.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Jak działa test ciążyw AMIL?

Test ciążyw AMIL wykrywa ludzką gonadotropinę kosmówkową w moczu - hormon produkowany przez organizm kobiety w czasie ciąży.

2. Kiedy najwcześniej mogę wykonać test ciążyw AMIL?

Test ciążyw AMIL możesz wykonać tak wcześnie jak to tylko możliwe, a więc od 6 dnia po spodziewanym zapłodnieniu, jednak dla uzyskania 99% wiarygodności zaleca się wykonanie testu w dniu spodziewanej miesiączki.

3. Czy muszę przeprowadzić test wykorzystując pierwszy poranny moc?

Test ciążyw AMIL możesz wykonać o każdej porze dnia, jednak twój pierwszy poranny moc jest najbardziej skoncentrowany i zawiera największą ilość hormonu hCG.

4. Jak wiarygodny jest test ciążyw AMIL?

Na podstawie przeprowadzonych badań klinicznych i laboratoryjnych stwierdzono, że wiarygodność testu ciążywego AMIL wynosi 99%. Warunkiem uzyskania pewnego wyniku jest prawidłowe przeprowadzenie testu.

5. Co może mieć wpływ na wynik testu?

Na wynik testu mogą mieć wpływ:

– specjalistyczne leki zawierające hCG (fałszywie pozytywny wynik).

Na wynik testu nie wpływają:

– antybiotyki,

– alkohol,

– doustne środki antykoncepcyjne,

– środki przeciwbólowe,

– terapia hormonalna niezawierająca hCG.

6. Co powinnam zrobić jeśli otrzymany wynik wskazuje, że jestem w ciąży?

Powinnaś niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu potwierdzenia, że jesteś w ciąży. Test ciążyw AMIL wykrywa tylko obecność hCG w moczu, na podstawie testu nie można stwierdzić czy ciąża rozwija się prawidłowo.

7. Czy pozytywny wynik może oznaczać coś innego niż normalną ciążę?

W pewnych stanach patologicznych poziom hCG w moczu może być podwyższony, np.: ciąża pozamaciczna, torbiele jajników, niektóre choroby nowotworowe.

8. Jak mogę stwierdzić, że test ciążyw AMIL został wykonany prawidłowo?

Jeśli w obszarze kontrolnym (C) pojawi się czerwona linia możesz być pewna, że test został przeprowadzony w prawidłowy sposób.

9. Co powinnam zrobić jeśli wynik pokazuje, że nie jestem w ciąży?

Wynik oznacza, że nie wykryto hormonu hCG w Twoim moczu i prawdopodobnie nie jesteś w ciąży. Jeśli miesiączka nie pojawiła się w ciągu 2-3 dni po spodziewanym terminie, powtórz test, wykorzystując nowe opakowanie. Jeżeli znów otrzymasz negatywny wynik powinnaś udać się do lekarza, aby ustalić przyczynę braku miesiączki.

UWAGI

- Test ciążyw AMIL jest testem jakościowym, wykrywa tylko obecność hormonu, nie jest przeznaczony do ilościowego określenia stężenia hCG w moczu. Każdy zarówno pozytywny jak i negatywny wynik powinien być potwierdzony przez lekarza.
- W przypadku gdy, stężenie hCG w moczu jest niższe niż czułość testu można otrzymać fałszywie negatywny wynik. Jeżeli nadal przypuszczasz, że jesteś w ciąży, powtórz test po upływie 48 godzin, wykorzystując pierwszy poranny moc.

CE 0483

IVD



Wytwórca:

AMIL Sp. z o.o., ul. M. Brzeskiej 9/4, 20-640 Lublin

www.amil.com.pl